

Die Heilung eingewachsener Zehennägel zu bezahlbaren Konditionen.

Die GERLACH-Nagelspange macht die Spangentherapie kostengünstiger.

Namenhafte Mediziner und Podologen sind von der qualitativ sehr hochwertigen Spange und den damit erzielten Therapieerfolgen überzeugt.



Lösungen für intelligente Fußpflege



GERLACH-NAGELSPANGE. Spange statt OP.



GERLACH-Nagelspange GERLACH U-Schlaufe

Mit der GERLACH U-Schlaufe überzeugen. Die GERLACH U-Schlaufe hat in ihrer Verwendung viele Vorteile.

Die U-Schlaufe ist demnach:

- anwendbar bei allen gängigen dreiteiligen Spangentypen am Markt;
- unabhängig von der Spangenschenkellänge;
- durch die bauchige U-Form trifft der Therapeut automatisch den korrekten Zug- und Hebelpunkt für die Kräfteinwirkung auf die Spangenschenkel auf dem Nagel;
- durch leichtes Ausrichten des Windehakens – mehr nach links oder mehr nach rechts – kann dieser Zug- und Hebelpunkt spielend einfach verlagert werden;
- extrem reißfest.

Das richtige Setzen, die korrekte Behandlung mit der dreiteiligen Spange, ist eminent wichtig.

Sämtliche auf einer dreiteiligen Orthonyxie-Spange ausgebildeten Therapeuten können ohne erneute Ausbildung die „GERLACH-Nagelspange“ bestellen.

GERLACH-Nagelspange und U-Schlaufe. Die technischen Daten.

	Bestell-Nr.	MP
GERLACH-Nagelspange		
Drahtdicke in 0,3 mm (5 Stück)	313 340 100	€€
0,4 mm (5 Stück)	313 340 200	€€
GERLACH U-Schlaufe		
Drahtdicke in 0,3 mm (5 Stück)	313 340 300	€€
Windehaken, Edelstahl rostfrei, Länge 15,5 cm, Spezialinstrument zum Setzen der GERLACH-Nagelspange. Mit dem Windehaken werden die beiden Haken der Spange mit der Schlaufe zusammengedreht.	313 270 000	

Kurzanleitung zum Anlegen



Maßnahmen für den Spangenschenkel



Kürzung des gebogenen Spangenesendes



Gekürzter Spangenschenkel



Richtig angelegte Spangenschenkel



Schenkelverbindung mit der U-Schlaufe



Resultat nach dem Anziehen der Schlaufe




Nach Entfernen sämtlicher Drahtenden



Endresultat

GERLACH-NAGELSPANGE.

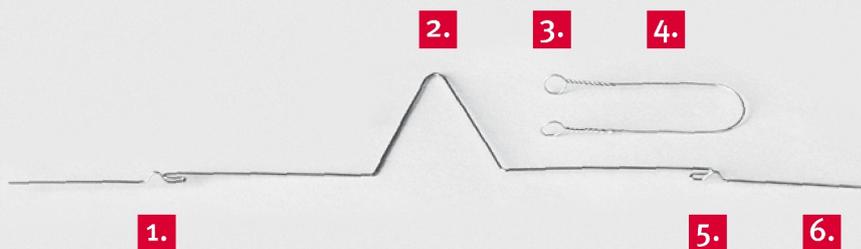

- 1. Omega (hier vertikal) liegt später auf dem Nagel auf und zeigt dann zum Nagelbett
- 2. Nase zum besseren Halten
- 3. Öse
- 4. U-Schlaufe
- 5. S-Biegung (hinter dem Omega) dient als Führung für die Schlaufe
- 6. Spangensende



Windehaken (313 270 000)