

Skalpelle und Klingen



Hohlmeißelklingen

Mit Hohlmeißelklingen lassen sich viele Fußprobleme besonders effektiv und präzise behandeln. Die Bleistift-Haltung ermöglicht ein besonders feinfühliges Bearbeiten von Problemstellen. Der exakte Schliff der Klingen ermöglicht einen tiefen und sauberen Schnitt. Die Hohlmeißelklingen sind leicht auswechselbar, einzeln steril verpackt und entsprechen damit den heutigen Anforderungen einer modernen Fußpflegepraxis. Je nach Problem stehen verschiedene Hohlmeißelklingen zur Verfügung.

Größe 1-3

zur Entfernung von Hühneraugen, Verhornungen im Nagelfalz und eingewachsenen Nägeln sowie weichen Hühneraugen zwischen den Zehen. Zum Ausschälen eines Hühnerauges wird die Klinge z. B. mit einer drehenden

Bewegung von links nach rechts oder umgekehrt geführt, wobei der Kern des Hühnerauges eingekreist und nach dem Lösen herausgehoben wird.

Größe 5-12


für die Entfernung von Verhornungen am Fuß, z. B. Behandlung von Fersenrissen und Rhagaden, flächiger und strangförmiger Hornhaut. Am besten arbeitet man mit den Klingen Nr. 5-8. Für die Entfernung starker und flächiger Verhornungen eignen sich die Klingen 10 und 12. Besonders gut lässt sich flächige Hornhaut abtragen, wenn vorher die Haut mit GEHWOL Hornhaut-Gelee behandelt wurde.

Das Haus GERLACH bietet Ihnen zur Einführung und Unterstützung Ihrer Arbeit ein einstündiges Video oder DVD an, in dem die Arbeitsweise mit diesen Klingen besonders gut erklärt wird.

Bei Hühneraugen



Bei Arbeiten mit der Hohlmeißelklinge unterstützt die Schreibhaltung die Feinmotorik des Anwenders und ermöglicht ein wesentlich feinfühligere, filigraneres Arbeiten.

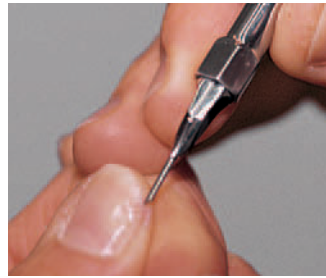


Der Mittelfinger unterstützt bei feinen Arbeiten, wie hier am Nagelfalz, durch sichere und bessere Führung Ihre sensible Behandlung.



Entfernen eines Hühnerauges mit kleiner Klinge. Der Kern wurde bereits entfernt.



Die umgebende Hornhaut wird bequem mit dem Hohlmeißel abgetragen.

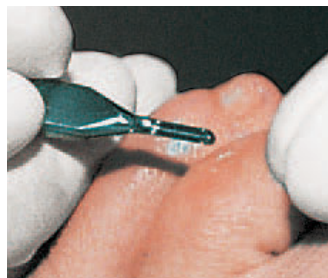

Mit dem Hohlmeißel erreicht man leicht die schwer zugänglichen Problemstellen des Zwischenzehenbereiches.



Herauslösen und Entfernen eines Hühnerauges unter der großen Zehe mit Hohlmeißelklingen der Nummer 1 oder 2.



Nach dem Klingenwechsel erfolgt die Nachbearbeitung des Bereiches mit einer Hohlmeißelklinge der Nummer 3 oder 5.

Bei Hornhaut



Druckstellen an der 2. Zehe werden mit einer breiten Hohlmeißelklinge bearbeitet.



Sichere Instrumentenführung bei Hornhautabtragung im Zwischenzehenbereich.



So einfach lassen sich Druckstellen am Vorderfuß entfernen.